


Montageanleitung

V-Fuss Secustand

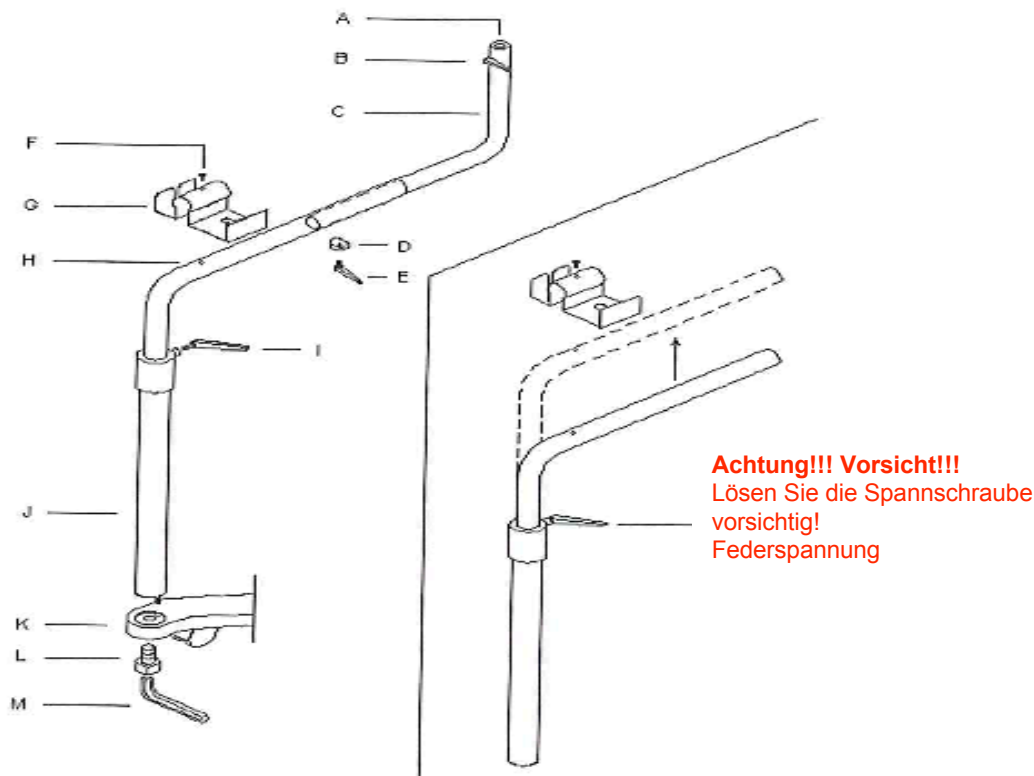

Setzen Sie das Stativ (J) auf den Rollenfuß (K). Achten Sie darauf, dass der Stahlstift des Stativs in die vorgesehene Bohrung des Rollenfußes eingesteckt wird.

Setzen Sie nun die Inbusschraube (L) durch die Bohrung des Rollenfußes in das Stativ und ziehen Sie diese mit dem Inbusschlüssel (M) fest.

Setzen Sie die Halterung (G) auf den Querarm des Stativs und ziehen Sie das Gewinde (H) mit der Schraube (F) fest.

Stecken Sie den Winkel (C) wie abgebildet in das Stativ. Führen Sie die Spannschraube (E) durch die Klemmscheibe (D) von unten durch die Nut in die Gewindebohrung im Winkel und ziehen Sie diese fest.

Stecken Sie die Spannschraube (B) in die vorgesehene Bohrung am oberen Teil des Winkels.

In die Öffnung (A) kann jetzt der TURNY mit dem Gelenk (oder eine andere Adaption) eingesteckt und mit der Spannschraube festgezogen werden.

Mit der Spannschraube (I) kann die Höhe verstellbar werden.



Branodata

DAS ERGONOMIE-GESCHÄFTSFELD
DER BRANGS + HEINRICH GMBH

**WICHTIG : Vorsicht beim Lösen der Spannschraube (I);
Stativ steht unter Federspannung !!!**